

Hi Tech Dent

Postaráme se o vaši ordinaci

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA SOUPRAVY

Denní údržba

Týdenní údržba



Hi Tech Dent

Postaráme se o vaši ordinaci

Denní údržba

Vyčistěte sítko plivátka.



Vyčistěte sítko terminálu savek.



Namíchejte si dezinfekční
a čistící roztok Orotol Plus,
Dürr Dental.



Dávkování Orotol Plus

2 litry vody a 2 odměrky
Orotol Plus

Míchací nádobu **protřepejte**.



 **Savky se
proplachují**

1× až 2× denně

1. propláchnutí

V polovině pracovní doby, nebo
maximálně po 4 hodinách

Postavte nádobu na zem dle
obrázku a připojte savky.



Nechte odsát **cca polovinu**
roztoku z nádoby, odpojte
savky a nádobu uschovejte.



Zbylé množství roztoku vylijte
do plivátka.



Očistěte polstrování pomocí
Tyron Universal.



Doplňování láhve

s destilovanou vodou

2. propláchnutí

Na konci pracovní doby

Položte nádobu na zem dle
obrázku a připojte savky.



Nechte odsát **většinu** roztoku
z nádoby a odpojte savky.



Vypněte soupravu
a sundejte láhev
na destilovanou
vodu.



Dolijte
destilovanou vodu
téměř do plna
a přidejte ICX
tabletů.



Láhev nasad'te
zpět na soupravu
a soupravu
zapněte.





ICX pro údržbu rozvodu vody



Jsou vaši pacienti chráněni?

Počty mikroorganismů mohou dosáhnout

>200.000 (CFU/ml) **do 5 dní**

pokud jsou ponechány bez ošetření.

Výhody tablet ICX

- Na odtoku z rozvodu vody stomatologické jednotky udržuje hodnotu koncentrace bakterií ≤ 10 CFU/ml.
- Snižuje hromadění usazenin.
- Je neustále přítomna ve vodě; poskytuje preventivní a proaktivní řešení.
- Během období nepoužívání vybavení zůstává ve vodě aktivní po dobu nejméně dvou týdnů.
- Eliminuje potřebu vypouštění rozvodu vody v noci.
- Je kompatibilní pro použití s restorativními spojovacími materiály. Neovlivňuje sílu spojení.
- Šetrná vůči stomatologickému vybavení.



Čistá ordinace, čistá práce

TYRON universal

Unikátní čistící prostředek, který byl vyvinut především pro použití ve stomatologických ordinacích.

Je určený pro čištění různých povrchů, zejména stomatologické soupravy a jejího polstrování. Zvolený design je v souladu s čistým, jednoduchým provedením, které neruší.

Složení TYRONU je ekologičtější vůči srovnatelným výrobkům, bez obsahu alkoholu. Je možné jej využít na různé povrchy bez zanechání stop. Dobře se vypařuje a zanechává příjemnou eukalyptovou vůni. Rozprašovač umožňuje použití pěny nebo spreje. Pěna je vhodná pro použití na hadřík, sprej je vhodnější pro plošné použití, např. polstrování.

Provedení 250 ml je zvoleno záměrně tak, aby se dobře drželo. Lahev není těžká a dobře se s ní manipuluje. Zakoupit lze i náhradní balení ve velikosti 1000 ml, které je možno uschovat jinde a nezabírá místo na pracovní desce.



Týdenní údržba

Vždy 1× týdně ve stejném čase minimálně 2 hodiny
před použitím dezinfekce Orotol Plus

 **Ráno před prací**

Nalijte do plivátka 50 ml Dürr
MD 555 a nechte působit **15 minut**.



Namíchejte si čistící roztok
Orotol MD 555 Dürr Dental.



Dávkování Orotol MD 555

2 litry vody a 2,5 odměrky
Orotol MD 555

 **Savky se
proplachují**

1× až 2× denně

Míchací nádobu **protřepejte**.



Položte nádobu na zem dle
obrázku a připojte savky.



Nechte odsát **většinu** roztoku
z nádoby a odpojte savky.



Zbylé množství roztoku vylijte
do plivátka.



Po **15 minutách** propláchněte
plivátko minimálně 1 litrem vody.



 **Nejdříve po 2 hodinách**

provedte Denní údržbu

Odpoledne po práci


Zkontrolujte zanesení fontánky
plivátka vodním kamenem,
případně vyčistěte.




Zkontrolujte zanesení fontánky
kelímku vodním kamenem,
případně vyčistěte.



Odpojte hadice savek.

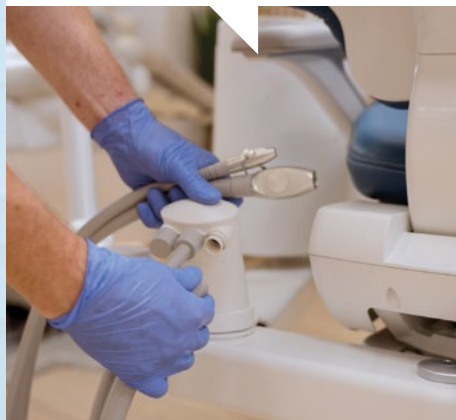

Vyčistěte filtr a terminál savek.

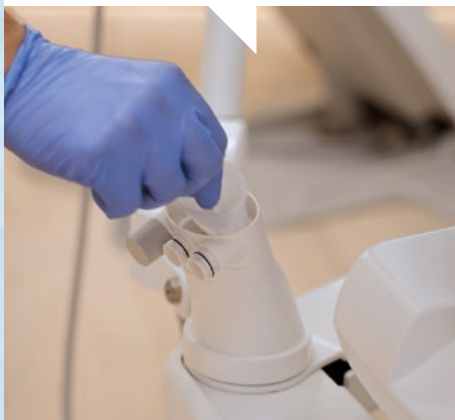


Rozeberte hlavice savek
a vyčistěte pomocí kartáčků.



Propláchněte obě hadice
střídavým pohybem proudem
vody.



Namažte **všechny** černé o-kroužky mazivem AL.TB.DUM.

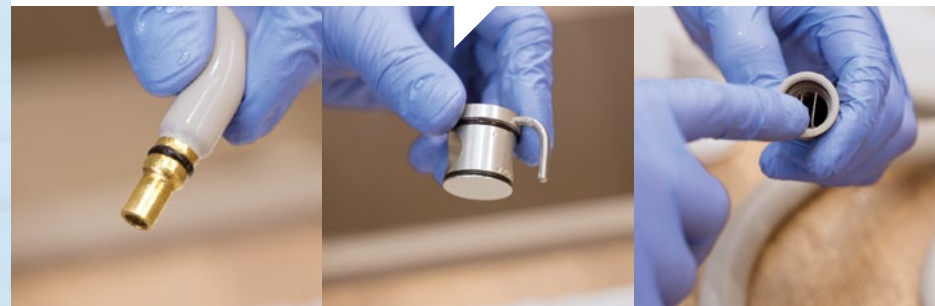

Složte savky
do původního
stavu.



* Varianta separátor amalgámu

Zkontrolujte a vyčistěte filtr separátoru amalgámu.



Namažte **všechny** o-kroužky mazivem AL.TB.DUM.



Opětovně nasadte kryty plivátkového bloku.




• Varianta plivátkový ventil

Zkontrolujte a vyčistěte filtr plivátkového ventilu.



Odsajte zbylou kapalinu v nádobě.

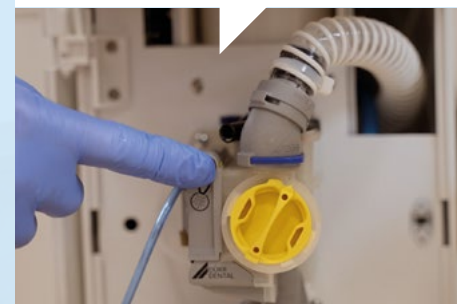

Namažte všechny o-kroužky mazivem AL.TB.DUM.



Opětovně nasadte kryty plivátkového bloku.



Otřete kryt operačního světla a plastové kryty soupravy jemným hadříkem.



Mazání turbínek a násadců

Hlavičku všech násadců 1 × denně



Nikdy nemažte elektrické mikromotory!



Turbínka

Vždy po 30 minutách práce, minimálně 1 × denně.



Kolénkový násadec 1:1

Vždy po 30 minutách práce, minimálně 1 × denně.



Kolénkový násadec 1:5

Vždy po 20 minutách práce, minimálně 1 × denně.

Assistina One



Celý proces mazání a čištění sprejových kanálků trvá pouhých 18 sekund, což z Assistiny One činí nejrychlejší řešení pro údržbu ve své třídě.

Zařízení využívá pouze stlačený vzduch bez nutnosti připojení k elektrickému napájení.

Jednotka je nastavena a připravena k provozu během chvilky. S tlačítkem spuštění jedním dotykem a pohodlnou správou kazet pro doplňování oleje a čisticích kapalin představuje Assistina One moderní řešení údržby pro zubní ordinace s vysokými standardy péče o násadce.



Hì Tech Dent

Purkyňova 2855/97a,
612 00 Brno - Královo Pole

+420 777 506 300

servis@hitechdent.cz

www.hitechdent.cz

Hi Tech Dent

Postaráme se o vaši ordinaci

PRAVIDELNÁ ÚDRŽBA SOUPRAVY

+420 777 506 300


hi@hitechdent.cz

hitechdent.cz

video
Denní
údržba



video
Týdenní
údržba

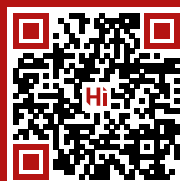

video
Hi Tech Dent



video
Doplňování
láhve



web
hitechdent.cz

